



WARNHINWEIS: Der Gebrauch ist mit Risiken verbunden. Nur für geschultes Fachpersonal geeignet.



Um einen sicheren und wirksamen Gebrauch zu gewährleisten, hat der Benutzer die Gebrauchsanweisung aufmerksam zu lesen.



support@soomamedical.com




+358 10 328 9811

1. Kopfhaube und Elektroden vorbereiten




∅ 50-54 cm → S
∅ 55-58 cm → M
∅ 58-62 cm → L

Wählen Sie die Polarität der Stimulation

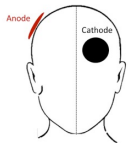

Linksseitige Schmerzen oder Linkshänder

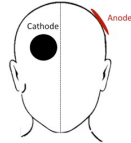

Rechtsseitige Schmerzen oder Rechtshänder

Elektroden in die Kappe setzen und die Kabel anschließen



2. Pads in 0,9%iger Kochsalzlösung tränken

15 ml pro Pad
Das Pad sollte sich ausdehnen und den gesamten Rahmen ausfüllen.



3. Positionierung der ComfoCap

Der untere Rand liegt über den Augenbrauen.

Die Mittellinie ist auf einer Linie mit der Nase.



4. Behandlung starten

Das Gerät einschalten




Die Kabel anschließen.
Rot auf Rot
Schwarz auf Schwarz



Taste drücken, um fortzufahren



Beginnen Sie, wenn der Kontakt unter einem Messwert von 15 liegt und „OK“ angezeigt wird.

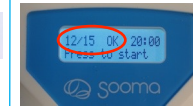

Durch Drücken der Taste kann die Sitzung jederzeit unterbrochen werden.

Nach Abschluss der Behandlung die Haube abnehmen und das Gerät ausschalten



5. Reinigung

Benutzte Pads entsorgen



Die Elektroden abspülen. Trocken wischen und reinigen



Die Haube waschen. Zum Trocknen aufhängen.



1. **Trockene/harte Stellen auf dem Pad.** Mehr Kochsalzlösung auftragen und mit dem Finger sanft auf die harten Stellen drücken. Wenn die harten Stellen nicht verschwinden, legen Sie ein neues Pad ein.
2. **Das Pad fällt beim Aufsetzen der Haube heraus.** Setzen Sie die Haube vorsichtig auf, damit die Pads nicht herausfallen. Vergewissern Sie sich, dass die Pads nach dem Aufsetzen der Haube noch an ihrem Platz sind. Ist dem nicht so, ist es erforderlich, die Haube abzunehmen und die Pads erneut in die Träger einzulegen. Werden die Pads beschädigt, sind diese durch neue Pads zu ersetzen.
3. **Die Meldung „Kontakt prüfen!“ wird angezeigt.** Drücken Sie den Elektrodenträger vorsichtig in Richtung Ihres Kopfes, um Kochsalzlösung freizusetzen. Sie können auch die Haube abnehmen und mehr Kochsalzlösung hinzufügen. Die Meldung verschwindet, wenn die Kontaktqualität auf einen Wert unter 15 sinkt. Liegt die Kontaktqualität bei 50+ und verbessert sie sich beim Drücken des Trägers nicht, überprüfen Sie die Anschlüsse und Kabel auf Beschädigungen.
4. **Die Stimulation wird als stark empfunden.** Drücken Sie vorsichtig auf den Träger, um mehr Kochsalzlösung freizusetzen. Sie können die Stimulation auch unterbrechen und mehr Kochsalzlösung hinzufügen, bevor Sie fortfahren.

Gegenanzeigen



Geräte oder Objekte aus Metall
im Kopfbereich

Herzschrittmacher

akutes Ekzem oder rissige Haut
im Stimulationsareal

Überprüfen Sie vor jedem Einsatz den Zustand der Haut, das System und das Zubehör

Die Haut im Stimulationsareal hat intakt und sauber zu sein. Metallische Objekte in der Nähe der Elektroden sind vor Behandlungsbeginn zu entfernen.

Bei jeder Behandlung neue Stimulationspads verwenden. Elektrolytrückstände verändern die Stromverteilung. Wiederholtes Einweichen fördert die Ansiedlung von Mikroorganismen.

Stellen Sie sicher, dass das System und das Zubehör sauber, intakt und funktionsfähig sind; Ersetzen Sie die Elektroden, wenn die Elektrodenoberfläche gebrochen oder verbogen ist, die Kabel ausgefranst sind oder die Kabelisolierung Risse aufweist.

Das System ist nicht zu verwenden, wenn Schmutz, äußere Beschädigungen oder eine fehlerhafte Funktion festgestellt werden.

Das Gewebe der Kopfhaut kann sich nach wiederholtem Waschen dehnen. Ersetzen Sie die Kopfhaut und alle Zubehörteile nach 3 Monaten täglichen Gebrauchs. Nur Komponenten und Zubehörteile als Ersatz verwenden, die Sooma als geeignet angegeben hat.

Das System und Zubehör nach jedem Gebrauch reinigen

1. Benutzte Pads entsorgen.
2. Das Gerät, die Kabel und die Anschlüsse mit einer Desinfektionslösung abwischen.
3. Die Elektroden mit fließendem warmem Wasser abspülen und mit einem Papiertuch sauber und trocken wischen.
4. Die Kopfhaut mit fließendem warmem Wasser ausspülen
5. Die Elektroden und die Kopfhaut vor der nächsten Behandlung vollständig trocknen lassen.

HINWEIS: Eine unzureichende Reinigung kann die Lebensdauer des Geräts und der wiederverwendbaren Zubehörteile verringern.

Die Kopfhaut vor einer Wiederverwendung waschen

- A. Handwäsche oder
- B. Maschinenwäsche bei 40 °C (Programm für Feinwäsche)